

PHILIPS

Efficia

DFM100
desfibrilador/monitor



Todo lo fundamental
de su respuesta de emergencia

El cuidado que importa, cuando importa



Para ofrecer altos niveles de atención, debe tomar decisiones rápidas e informadas, en el lugar de una emergencia y a lo largo de todo el tratamiento. Necesita que su equipo sea fácil de usar mientras trata a sus pacientes en el campo, para monitorear la evolución de su estado durante el transporte al hospital y mientras continúa brindando atención en el hospital.

El desfibrilador y monitor Efficia DFM100 está diseñado con tecnología probada en el campo, que ofrece una funcionalidad central con un conjunto de características escalables y un costo de propiedad mejorado.

Imagine la siguiente situación:

Llega una llamada de emergencia, un paciente se queja de dificultad para respirar y usted entra en acción.

Preparación: El Efficia DFM100 indica que está listo con un reloj de arena parpadeante activo que muestra los resultados de las autopruebas automáticas y los LED del panel frontal que indican el estado de la alimentación, lo que le da una indicación clara de que el dispositivo está listo para su uso inmediato.

Respuesta: Pequeño, ligero y fácil de transportar con un maletín de transporte resistente y envoltorio opcional.

Desfibrilación: Las indicaciones de voz claras lo guían a través de los pasos para desfibrilar al paciente con la opción de un modo AED para proveedores de soporte vital básico. Los proveedores de soporte vital avanzado pueden utilizar los controles y la perilla de ajuste SmartSelect para navegar por los menús para monitorear y administrar la desfibrilación o la terapia de estimulación al paciente.


Monitoreo: La monitorización del ECG, SpO₂, la presión arterial y el CO₂ espiratorio final del paciente agregan información a sus decisiones para la atención inmediata y continua y durante el transporte. El Efficia DFM100 utiliza los mismos puertos para las mediciones clínicas que los monitores de pacientes Phillips para facilitar la entrega del paciente a su llegada al hospital. El dispositivo recopila datos de tendencias durante hasta 8 horas de monitoreo continuo, para facilitar la documentación de incidentes y la revisión de casos.

En cada paso en la atención continua de un paciente, ya sea prehospitalaria o en el hospital, el Efficia DFM100 lo apoya en su capacidad de reacción, a administrar la desfibrilación (si es necesario) y monitorear la condición del paciente.

El Efficia DFM100 está diseñado para satisfacer las necesidades de los proveedores de soporte vital básico y avanzado.

El Efficia DFM100 ofrece:

- La entrega de un choque 150J (nivel de energía recomendado para adultos) en 5 segundos, utilizando la misma terapia bifásica Philips SMART que nuestra familia premium de desfibriladores HeartStart.
- La capacidad de utilizarse tanto en pacientes adultos como en lactantes y niños para desfibrilación, monitorización, cardioversión sincronizada o estimulación. Incluso tiene un solo juego de paletas para pacientes adultos o bebés y niños, por lo que los proveedores de atención no tienen controles adicionales para saber que tienen el equipo adecuado.
- Un botón de categoría de paciente que les permite a los médicos cambiar rápidamente entre categorías de pacientes, cambiando automáticamente los límites de los parámetros y cambiando la configuración de joules entre adultos y bebés o niños en el modo AED, si corresponde.
- Un modo de AED opcional (incluida la capacidad de AED para bebés/niños) que utiliza el algoritmo de análisis SMART de Philips para guiar a los proveedores de soporte vital básico a través de la entrega de desfibrilación, con la operación rápida y fácil 1-2-3 iniciada por Philips, y utilizada en todos los AED de Philips.
- Parámetros opcionales (SpO₂, NBP, EtCO₂) para la monitorización continua de las señales vitales del paciente.
- Un indicador de contacto con el paciente en las paletas para dar retroalimentación inmediata sobre la colocación de la paleta y el contacto para mejorar la confianza del proveedor de soporte vital.
- Una versión robusta para EMS o transporte (clasificación IP54), que incluye base protectora, sistema de almacenamiento de accesorios y un collar estabilizador de cable de terapia para una conexión de cable hermética.

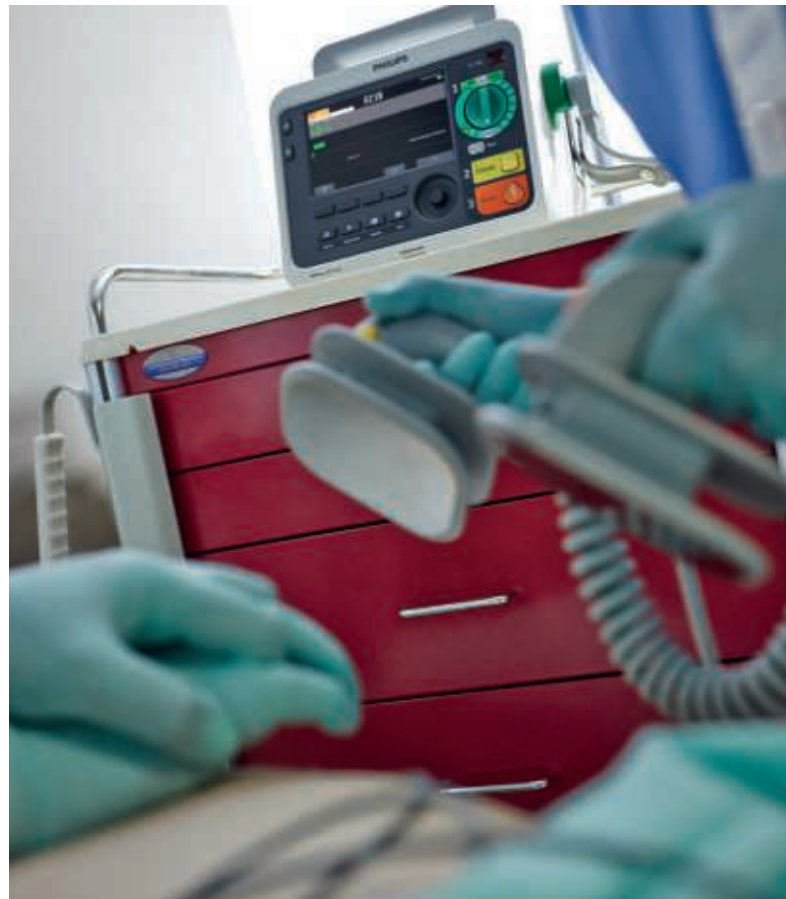

Mejora el costo de propiedad

El indicador "Listo para usar" patentado por Philips confirma rápidamente que el dispositivo ha pasado las autopuebas, y está listo para responder, lo que implica un ahorro en pruebas regulares por parte de los técnicos. Los resultados de las pruebas también se almacenan, lo que le brinda un año completo de documentación de pruebas automatizadas para registros y auditorías internas.

Las configuraciones de dispositivos van desde un AED básico hasta un desfibrilador/monitor ALS con todas las funciones con desfibrilación manual, modo AED, ritmo y parámetros de monitoreo opcionales. Si su Efficia DFM100 tiene la opción de monitoreo EtCO2, puede compartir módulos entre sus dispositivos según sea necesario, para obtener importantes oportunidades de ahorro.



Para ayudar a controlar los costos operativos diarios, el DFM100 puede utilizar la línea Efficia de consumibles de monitoreo de pacientes de menor precio de Philips. El Efficia DFM100 está diseñado con la misma interfaz de usuario en todas las versiones de hospital y EMS, y es similar a nuestra familia de desfibriladores HeartStart. Una garantía de varios años*, le ayuda a controlar los costos generales de servicio.

* Los términos y condiciones de la garantía pueden variar según el país; consulte con su representante local de Philips las opciones de garantía disponibles en su país.

Un paquete galardonado



Diseñamos el Efficia DFM100 teniendo en cuenta sus necesidades: par ser fiable, flexible y asequible. Esto es lo que hace que el Efficia DFM100 sea fácil de poseer y fácil de usar. En última instancia, eso significa que puede dedicar su atención a las necesidades de su paciente.

- Premio de Diseño IF 2015
- Ganador de la marca SG de Buen Diseño de Singapur 2015
- Premio GIO 2015
- Premio RedDot 2014
- Premio de Diseño Exitoso (China) 2014

Shanghai International Holding Corp. GmbH
(Europa) Eiffestraße 80, 20537
Hamburgo, Alemania



Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc.
Dirección registrada/de producción:
No.2 Keji North 3rd Road,
Distrito de Nanshan, Shenzhen, P.R. China 518057

© 2021 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados. Philips se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones o a discontinuar cualquier producto en cualquier momento, sin previo aviso ni obligación, y no será responsable por las consecuencias que resulten del uso de esta publicación. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos propietarios.



www.philips.com

4522 991 70721 * JUL 2021